

Symbolen

-  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
-  Voldoende voor 1 test
-  Uitsluitend voor éénmalig gebruik
-  Houdbaarheidsdatum
-  Batchnummer
-  Artikelnummer
-  Tegen vocht beschermen
-  Bescherm tegen direct zonlicht
-  Bewaar tussen 10°C en 40°C
-  Polyethyleen recyclebaar

Vitaminstore Nederland BV
Postbus 9508, 1006 GA Amsterdam
www.vitaminstore.nl
vitamintest@vitaminstore.nl
tel. +31(0) 20 245 7685

REF:21006
Revisie 0.1
SKU:10104
Datum laatste herziening 15-02-2023

Samengesteld en gedistribueerd door:

MLT Group BV
Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen
The Netherlands

Registreren

Alleen bij volledige registratie kunnen we je sample in behandeling nemen.

- Registreer je sample via www.vitaminstore.nl/speekselsestest.



Scan voor registratie
en afname video

Let op

- Het niet opvolgen van instructies kan leiden tot onbruikbare of onnauwkeurige testresultaten.
- De meegeleverde handschoenen hebben tot doel om het sample niet in aanraking te laten komen met eventueel gebruikt hormoon crème. Hormoon crème kan (onzichtbaar) lang na gebruik in huis achterblijven en het resultaat beïnvloeden. Zorg voor een schone omgeving en gebruik de handschoenen voor de afname.
- Neem je de samples in het weekend of op een feestdag af? Bewaar je samples in de koelkast en verstuur ze de eerstvolgende werkdag.
- De kit buiten het bereik van kinderen houden.
- Indien een volwassene een kind helpt met de afname, dient de volwassene handschoenen te dragen.
- De kit is voor éénmalig gebruik. Gebruik de onderdelen alleen voor het afnemen van je speekselsample. Gebruik alleen de meegeleverde materialen.
- Serieuze incidenten (letsel) in relatie tot de kit dienen aan ons en de Nederlandse overheid (IGJ) gemeld te worden.

In jouw kit

2 speekselbuisjes, 2 handschoenen, 2 stickers voor op de buisjes, 1 vocht-absorbeerder, 1 sealbag, 1 retourenvelop, 1 afname instructie.

Jouw unieke samplenummer:



Speekselsestest afname instructie

Voordat je begint

- Lees de gehele instructie goed door voordat je begint met de afname.
- 24 uur voor afname **géén hormoon crème** gebruiken.
- 3 uur voor afname **géén vleesproducten eten**, dit kan sporen van hormonen bevatten.
- 1 uur vóór afname **niet eten, drinken (behalve water) en roken**.
- 5 minuten vóór afname **géén water meer drinken**.


Afname tijden

Het is belangrijk dat je je samples op dezelfde dag en op de juiste tijdstippen afneemt:

2 samples voor cortisol dagprofiel:

- Sample 1 één uur na normale ontwakings tijd
- Sample 2 is 3 tot 4 uur later

Instructie stappen

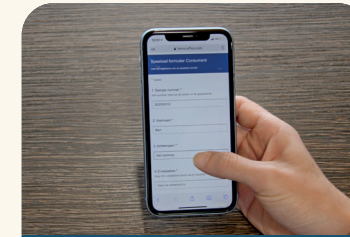

1. Registreren

Registreer je sample en bekijk ook de afname video op onze website: www.vitaminstore.nl/speekseltest.



2. Voorbereiden

Lees afname instructieboekje volledig door. Leg alle onderdelen voor je op een schone tafel, laat de buisjes in het plastic zakje.



3. Handen wassen

Was je handen zorgvuldig voor de afname van ieder sample.



4. Afname

Vul de buisjes op de juiste tijden. Trek de plastic handschoenen aan tijdens de afname. Pak een buisje en vul deze minimaal halfvol met speeksel. Klik het buisje goed dicht. Doe de handschoenen uit zonder de gedeeltes van de vingers met je handen aan te raken.



5. Sticker

Schrijf het sample nummer (het nummer vind je op het doosje), tijd en datum op een sticker en plak deze op het juiste buisje.



6. Buisje in sealbag

Doe het buisje, samen met de vochtabsorbeerder, in de sealbag.



7. Herhalen

Herhaal stap 3 t/m 6 voor het andere buisje op het juiste tijdstip. Sluit de sealbag dan goed en stop het in het doosje.



8. Samples versturen

Plaats het doosje in de retourenvelop. Stuur je samples op de dag van afname of de eerst volgende werkdag retour via een postpunt. **Belangrijk:** vergeet je registratie niet via www.vitaminstore.nl/speekseltest. ➔

Contact

Heb je vragen of missen er onderdelen in de kit, dan helpen we je graag verder via vitamintest@vitaminstore.nl, tel. +31(0)20 245 7685 of via de chat.